

TrachFlush

Prevenzione della VAP & rimozioni delle secrezioni tracheali senza ricorrere all'aspirazione

TrachFlush – 1 dispositivo 2 funzioni

Controllo della pressione della cuffia

TrachFlush™ mantiene continuamente la pressione della cuffia impostata dall'operatore e protegge i pazienti dalla VAP¹ e dalle lesioni tracheali

Funzione Flush

TrachFlush™ rimuove le secrezioni al di sopra e al di sotto della cuffia nei pazienti sottoposti a ventilazione meccanica invasiva con un semplice pulsante^{2 3}



Benefici dell'utilizzo di TrachFlush



Proteggi i tuoi pazienti dalla VAP

TrachFlush™ mantiene continuamente la pressione della cuffia impostata dall'operatore, contribuendo a ridurre le microaspirazioni e il rischio di VAP^{1 4}.



Eliminazione facilitata delle secrezioni

TrachFlush™ rimuove le secrezioni al di sotto e al di sopra della cuffia (secrezioni sottoglottiche) senza la necessità di aspirazione^{2 3}.



Riduzione del carico di lavoro e dei costi

- 1) Nessun controllo manuale della pressione della cuffia,
- 2) Potenziale riduzione delle microaspirazioni e della VAP^{1 4},
- 3) Rimozione delle secrezioni sopra e sotto la cuffia con un solo pulsante^{2 3}.



Maggiore comfort per il paziente con TrachFlush™

- 1) Nessun effetto "aspirapolvere" nelle vie aeree, 2) Nessuna pressione negativa nelle vie aeree, come nei dispositivi per la tosse assistita, e 3) Nessuna instabilità post-aspirazione.




TrachFlush può essere utilizzato con qualsiasi tubo endotracheale e cannula tracheostomica.

Sistema di controllo della cuffia

Pressione della cuffia continuamente ottimizzata e controllata. Supporta la terapia ventilatoria e protegge i pazienti dalla VAP¹ e dalle lesioni tracheali, grazie a funzionalità dedicate quali:

- Sgonfiaggio rapido della cuffia per un'estubazione sicura.
- Aumento temporaneo della pressione della cuffia per un periodo definito dall'operatore, al fine di garantire la pervietà delle vie aeree e ridurre il rischio di aspirazioni durante il riposizionamento del tubo, i cambi di posizione del paziente, ecc.

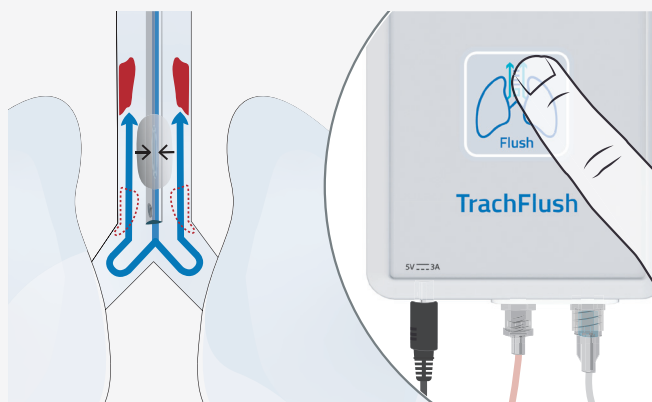

Funzione Flush

Funzione semplice ed intuitiva per la rimozione delle secrezioni tracheali al di sopra e al di sotto della cuffia.

Con la semplice pressione di un pulsante, TrachFlush™ sgonfia la cuffia e sfrutta la pressione dell'aria generata dal ventilatore durante la fase inspiratoria per convogliare ("flush") le secrezioni presenti sopra e sotto la cuffia verso la cavità orale. Non è quindi necessario eseguire manualmente l'aspirazione tracheale².

Benefici clinici comprovati – riferimenti bibliografici selezionati

1 Riduzione delle microaspirazioni e della VAP

L. Lorente, M. Lecuona, A. Jiménez, L. Lorenzo, I. Roca, J. Cabrera, C. Llanos, M. Mora. Continuous endotracheal tube cuff pressure control system protects against ventilator-associated pneumonia. *Crit Care*. 2014 Apr; 18(2): R77.

2 Rimozione delle secrezioni sotto la cuffia senza ricorrere all'aspirazione tracheale

Anne H. Nielsen, Dan S. Karbing, Christoffer G. Sølling, Robert R. Winding, Stephen E. Rees, and Nilanjan Dey. Efficacy of an automated secretion removal technology at different inspiratory pressures. *Respiratory Care Journal*, April 2023, respcare. 10850

3 Rimozione delle secrezioni sottoglottiche senza ricorrere all'aspirazione sottoglottica.

L. Vivona, A. Zanella, S. Rees, D. Karbing, M. Bellotti, G. Florio, F. Sodi, G. Caddeo, M. Panigada, A. Pesenti, G. Graselli. In vivo evaluation of a new endotracheal tube cuff controller promoting tracheal secretion clearance: preliminary results. *AARC*, 2022.

4 Riduzione delle microaspirazioni

Nseir S, Zerimech F, Fournier C, Lubret R, Ramon P, Durocher A, Balduyck M. Continuous control of tracheal cuff pressure and microaspiration of gastric contents in critically ill patients. *Am J Respir Crit Care Med*. 2011 Nov 1;184(9):1041-7.

Per ulteriori riferimenti clinici, scansionare il codice QR riportato di seguito.

Scopri di più sul TrachFlush™



TrachFlush



Usa il tuo smartphone
per scansionare il QR-code

Visita il nostro sito
www.trachflush.com



MOVI S.p.A
Distributore per l'Italia
Via Dione Cassio 15
20138 Milano
Tel. +39 02 509051
Fax +39 02 5061048
www.movigroup.com